

Winkel GmbH
Ruf Arten Bezeichnung

Alle Angaben zum Handbuch wurden sorgfältig erarbeitet,
erfolgen jedoch ohne Gewähr.

Vertriebsrechte dieser Version liegen ausschließlich
bei: Winkel GmbH, Kerkhagen 33, D-58513 Lüdenscheid
Geschäftsführer Herr Andreas Vogel, Herr Peter Vogelpoel

© 1980–2020 Winkel GmbH, Lüdenscheid

Das vorliegende Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Handbuchs oder Programms darf in
irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren)
ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt
oder verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die im Buch verwendeten Bezeichnungen
und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen Warenzeichen-,
marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Rufarten Bezeichnung	Funktion
Ruf (Bewohner Ruf)	Standard Ruf der Rufanlage. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet. Ein Bewohnerruf wird durch leuchten der roten LED signalisiert.
WC Ruf	WC Ruf der Rufanlage. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet. Ein WC Ruf wird durch leuchten der roten und weißen LED signalisiert.
TO Ruf /WC Ruf (Time over Ruf/WC Ruf)	Entsteht wenn ein Ruf/WC Ruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 15 Min. Ein TO Ruf/WC Ruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Pflegedienstleitung
TTO Ruf/WC Ruf (Time Time over Ruf/WC Ruf)	Entsteht wenn ein TO Ruf/WC Ruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 15 Min. Ein TTO Ruf/WC Ruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Heimleitung
Notruf	Wird ausgelöst, wenn eine Anwesenheit gesetzt wurde, ein Notfall eintritt und die Ruftaste gedrückt wird. Standardmäßig steht der Notruf an der ersten Stelle im Dienstzimmer und kann z.B. an DECT Telefone weitergeleitet werden. Ein Notruf wird durch leuchten der grünen LED und blinken der roten LED signalisiert.
TO Notruf (Time over Notruf)	Entsteht wenn ein Notruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 3 Min. Ein TO Notruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Pflegedienstleitung.
TTO Notruf (Time Time over Notruf)	Entsteht wenn ein TO Notruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 3 Min. Ein TTO Notruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Heimleitung.
Anwesend 1	Standard Anwesenheit der Rufanlage, der Ruf wird quittiert. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt. Eine Anwesenheit wird durch leuchten der grünen LED signalisiert.
Anwesend 2	Wird verwendet für eine zweite Anwesenheit. Wird auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt.
Anwesend Arzt	Wird für eine Arzt Anwesenheit verwendet. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt.
Hilferuf	Kann ausgelöst werden wenn Hilfe benötigt wird. Wird durch eine gelbe Taste ausgelöst und wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet.
TO Hilferuf (Time over Hilferuf)	Entsteht wenn ein Hilferuf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 6 Min. Ein TO Hilferuf kann z.B. einem höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Pflegedienstleitung.

TTO Hilferuf (Time Time over Hilferuf)	Entsteht wenn ein TO Hilferuf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 6 Min. Ein TTO Hilferuf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Heimleitung.
Störung Zi.Bus (Störung Zimmerbus)	Meldung wird ausgegeben, wenn eine Zimmerkomponente defekt oder falsch adressiert ist. Es wird eine Zimmerbus Störung ausgegeben. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt. Eine Störung wird durch blinken der grünen LED signalisiert.
Diagnostik	Wird dann ausgelöst, wenn ein potentialfreier Kontakt geöffnet oder geschlossen wird. Z.B. angeschlossene Ernährungspumpe. Es wird ein Diagnostikruf ausgelöst. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet. Ein Diagnostik Ruf wird durch leuchten der roten LED und blinken der gelben LED signalisiert.
TO Diagnostik (Time over Diagnostik)	Entsteht wenn ein Diagnostikruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 15 Min. Ein TO Diagnostik Ruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Pflegedienstleitung.
TTO Diagnostik (Time Time over Ruf)	Entsteht wenn ein TO Diagnostik Ruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 15 Min. Ein TTO Diagnostik Ruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Heimleitung.
Arztruf	Wird verwendet um nach einen Arzt zu rufen. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet.
TO Arztruf	Entsteht wenn ein Arztruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 3 Min. Ein TO Arztruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Pflegedienstleitung.
TTO Arztruf	Entsteht wenn ein TO Arztruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 3 Min. Ein TTO Arztruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Heimleitung.
Steckerwurf	Wird ausgelöst, wenn der Handauslöser vom Taster abgezogen wurde. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet. Ein Steckerwurf wird durch blinken der gelben LED signalisiert.
Feuer	Wird ausgelöst, wenn ein Feuer Alarm ansteht. Es kann auf der Dienstzimmeranzeige sowie auf den Zimmerdisplays, die Melder Linie und die Melder Nummer angezeigt werden. Und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet werden.

Flucht	Wird ausgelöst, wenn ein DESO-System verbaut ist und ein Bewohner versucht unbemerkt das Gebäude zu verlassen, es wird ein Fluchtruf ausgelöst. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet.
Flucht Batterie schwach (Low. Batt.)	Wird ausgelöst, wenn z.B. ein dementer Bewohner unbemerkt das Gebäude verlässt und die Batterie vom DESO Transponder schwach ist. Die Meldung Flucht-TR-LB wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt.
Mobiler Ruf	Wird durch einen IPS Funkfinger ausgelöst, wenn der Bewohner nicht im eigenen Zimmer ist. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt und auf z.B. DECT Telefone weitergeleitet.
TO Mobiler Ruf (Time over Mobiler Ruf)	Entsteht wenn ein TO Mobiler Ruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 15 Min. Ein TO Mobiler Ruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Pflegedienstleitung.
TTO Mobiler Ruf (Time Time over Mobiler Ruf)	Entsteht wenn ein TO Mobiler Ruf nach einer festgelegten Zeit immer wieder wiederholt aber nicht durch die Anwesenheit quittiert wurde, im Standard nach 15 Min. Ein TTO Mobiler Ruf kann z.B. einen höheren Priorisierten Empfänger erreichen, z.B. Heimleitung.
Funk Batterie schwach (Low. Batt.)	Wenn ein IPS Funkfinger ausgelöst wird und dessen Batterie schwach ist, gibt es die Meldung Funk Low.Bat diese wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt.
Funk Störung	Die Meldung Funk Störung wird ausgelöst, wenn der Empfänger nicht, auf dem Modul steckt oder einen Defekt aufweist. Wird im Standard auf der Dienstzimmeranzeige angezeigt.